
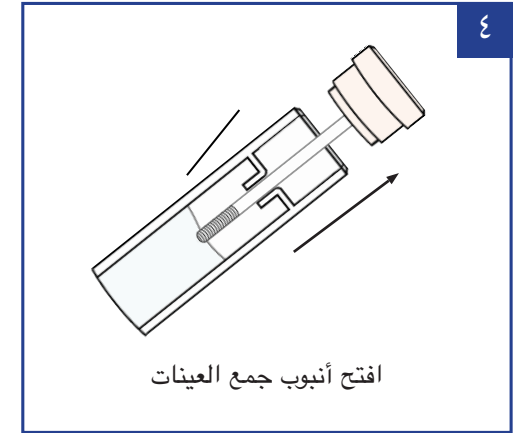
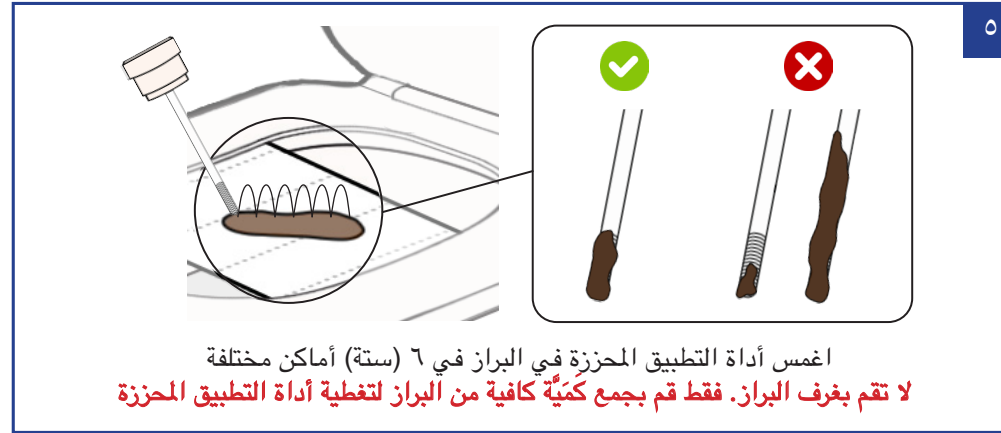
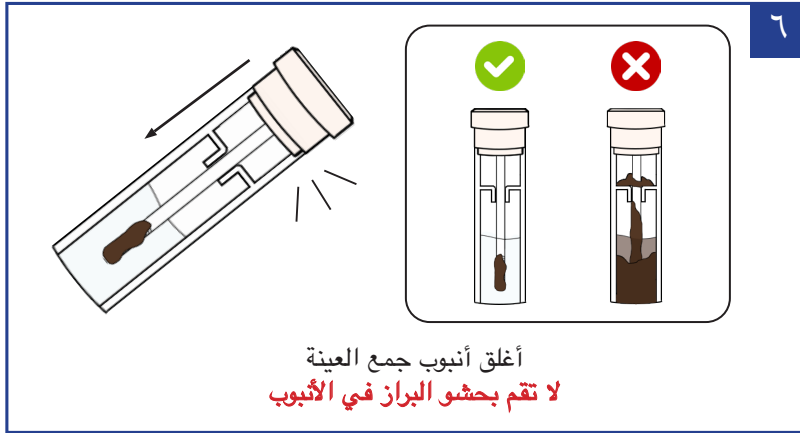


# طريقة استخدام

الطرء المرسل يتضمّن : عدد ١ دليل استخدام سريع، عدد ١ عبوة بريدية  
معدة لإرجاع العينة، عدد ١ أنبوب لجمع العينة، عدد  
٢ ورق لجمع العينة، عدد ١ كيس لوضع العينة  
تعليمات التجميع : لا يتطلب الأمر أي تحضيرات ولا توجد قيود غذائية

HEMOSURE®  
**AccuREADER**®  
A100

اختبار البراز المناعي

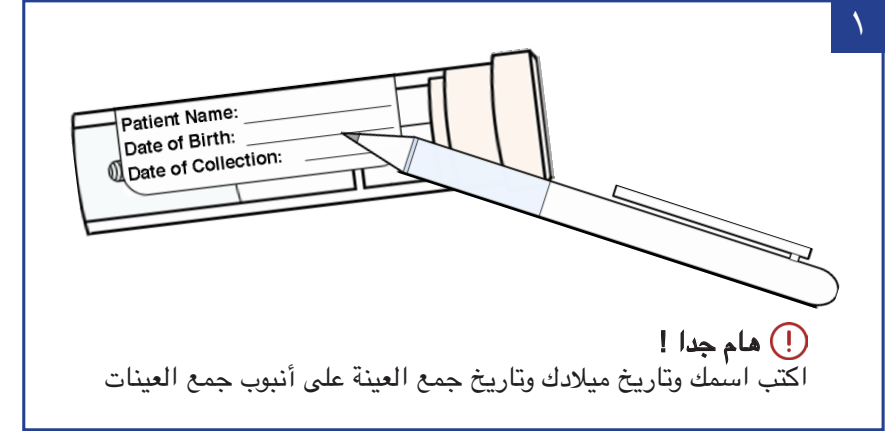

قد تكون النتائج غير صالحة إذ  
تم جمع الكثير من البراز  
تم تجميد أو تسخين العينة  
إذا لامس البراز الماء أو البول في وعاء المراض  
إذا تم إرجاع العينة بعد ٨ أيام

للمساعدة في هذه التعليمات ، يرجى الاتصال

مكتب طبيب

أو

HEMOSURE - الدعم الفني : 1-888-HEMOSURE (436-6787)  
البريد الإلكتروني : techsupport@hemosure.com

