

HEMOSURE® AccuREADER® A100

糞便免疫化學隱血測試

FIT使用說明書

預裝郵件包含: 1份快速指南, 1個回郵信封, 1個樣本採集管, 2張樣本採集紙, 1個樣本袋

採樣說明: 無需前期準備或忌口



1

❗ 重要提示!
將您的姓名、生日、採集日期填寫於採集管的標籤上。

2

放置樣本採集紙於座便器上方，用粘合劑固定其邊緣。放下座圈。

3

排便於採集紙上。

4

將採樣棒從樣本採集管抽出。

5

將採樣棒戳入糞便樣本中**6**個不同的位置進行取樣。
不要舀取大量糞便，只收集足以覆蓋採樣棒凹槽的樣本即可。

6

將採樣棒塞回採樣管。
請勿將糞便塞入管內。

7

Return Address Required
From: John Doe
123 Main Street
Anytown, USA 12345
Contents: Diagnostic Specimens
Return To: Your Laboratory
456 Main Blvd
Anytown, USA 12345

先將採集管插入樣本袋並密封。
再將樣本袋放入回郵信封並密封。

8

通過郵寄或本人親自遞送樣本至指定收集地點。

以下行為會導致檢測結果無效:

- 糞便採樣過量
- 樣本被冷凍或加熱
- 採集在便池中被水或者尿液稀釋的糞便
- 樣本在採樣8日後送達指定收集地點

對於線上說明如有任何質疑，請聯繫:

- 你的主治醫師辦公室
或者
- 致電 Hemosure:
1-888-HEMOSURE (436-6787)
電子郵件: techsupport@hemasure.com