

HEMOSURE® AccuREADER® A100

粪便免疫化学隐血测试

FIT使用说明书

预装邮件包含: 1份快速指南, 1个回邮信封, 1个样本采集管, 2张样本采集纸, 1个样本袋

采样说明: 无需前期准备或忌口



1

重要提示!
将您的姓名、生日、采集日期填写于采集管的标签上。

2

放置样本采集纸于座便器上方, 用粘合剂固定其边缘。放下座圈。

3

排便于采样纸上。

4

将采样棒从样本采集管抽出。

5

将采样棒戳入粪便样本中**6个**不同的位置进行取样。
不要舀取大量粪便, 只收集足以覆盖采样棒凹槽的样本即可。

6

将采样棒塞回采样管。
请勿将粪便塞入管内。

7

先将采集管插入样本袋并密封。
再将样本袋放入回邮信封并密封。

8

通过邮寄或本人亲自递送样本至指定收集地点。

以下行为会导致检测结果无效:

- 粪便采样过量
- 样本被冷冻或加热
- 采集在便池中被水或者尿液稀释的粪便
- 样本在采样8日后送达指定收集地点

对于综上所述如有任何质疑, 请联系:

- 你的主治医师办公室
或者
- 致电 Hemosure:
1-888-HEMOSURE (436-6787)
电子邮件: techsupport@hemosure.com